

飛沫防止 フェイスシールド

視界良好！
吐く息でくもりにくい

- くもりにくい
- 軽量
- ワンタッチ装着


- 顔まわりを広範囲に保護します。
- 上部より吐息が抜け、熱がくもりにくい。
- マスクやめがねの上からでも取り付けできます。



FACE SHIELD

取扱説明書


セット内容

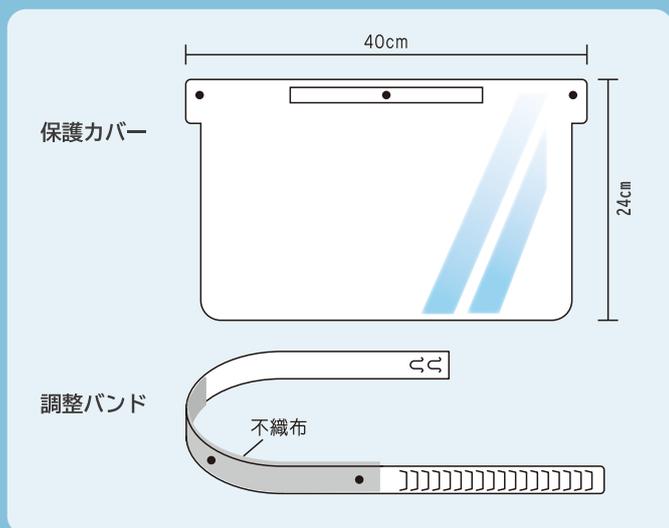



組み立て手順

1. 保護カバーを調整バンドに取り付けます。

※調整バンドは不織布側が内側になります。

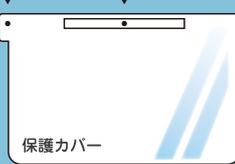

2. 差し込み部を調整し、頭のサイズに合わせてください。

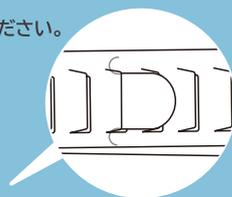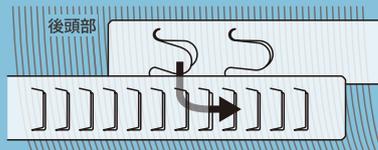

▲使用上の注意

- 本品は飛沫を防ぐのが目的であり、ウイルスを防ぐものではありません。
- 破損の原因になりますので、絶対に折り曲げたり強くひっぱたりしないでください。万一、破損した場合は直ちに使用中止してください。
- 保管時は直射日光や高温になる場所を避けてください。
- 組み立て時にPETシートで手を切る恐れがありますので、注意して組み立ててください。
- 使用中に生じた損害などに関しては一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本来の用途以外でのご使用はおやめください。

商品名：フェイスシールド
材質：調整バンド / 不織布、PP
保護カバー / PET